

Omsorgsavdelningen

Ansvarig

Helen Hansson Malmgren
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Upprättad den

2014-06-25

Upprättad av

Amanda Stavås, arbetsterapeut
Sofia Rahdevi fysioterapeut

Reviderad den

2024-11-20

Akuta problem med hjälpmedel jourtid

Bakgrund

Trasiga hjälpmedel ska i första hand åtgärdas under kontorstid av arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast eller utsedd tekniker.

I de fall ett hjälpmedel går sönder jourtid ska denna rutin följas. Insatserna som kan ske jourtid är begränsade till de som nämns nedan. Det kan kräva individuella lösningar till nästkommande vardag då arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast kontaktas.

Som stöd kan vårdpersonal och anhöriga använda den bruksanvisning som finns i hemmet eller på leverantörs hemsida. Vid behov kan tjänstgörande sjuksköterska konsulteras.

Kontroller och åtgärder för lyft

Kontrollera först följande:

1. Om nödstoppknappen är intryckt, vrid i så fall ut den.
2. Om sladden sitter kvar i vägguttaget ska den dras ut.
3. Att inga sladdar är i kläm.
4. Att handkontrollen är ansluten.
5. Att lyften laddad.
6. Om det har gått en säkring i bostaden.

Akutlyft finns att låna, se särskild rutin. OBS! Max brukarvikt för akutlyft är 150kg.

Elektrisk nödsänkning av mobil lyft:

Olika modeller har olika varianter på elektrisk nödsänkning. Läs bruksanvisning för respektive akutlyft för att säkerställa modellens nödsänkning.

Exempel på nödsänkning är att lyftarmen kan sänkas elektriskt genom att trycka med ett smalt föremål till exempel en penna på markering för "Ned" på krontröboxen. Hålet finns under nödstoppknappen och föremålet får inte vara vasst.

Mekanisk nödsänkning av mobil lyft:

Nödsänkingsreglaget ser olika ut på olika modeller men de är alltid röda. Den mekaniska nödsänkningen fungerar endast när lyftarmen är belastad d.v.s. när brukaren står/sitter i lyften. Sänkningen sker med viss fördröjning.

Alt. 1 – Dra det röda nödsänkingsreglaget rakt upp.

Alt. 2 – Vrid den röda nödsänkingscylindern i pilarnas riktning.

Alt. 3 – Lyft nödsänkingsreglaget rakt upp.

Nödsänkning av taklyft:

Vid eventuell driftstörning i handkontrollen eller i elektroniken kan nödsänkning ske genom att dra i nödsänkingsanordningen. Denna sitter på motorn i taket. Se alltid till att nödsänkningen av brukaren sker till säng, rullstol eller annan lämplig plats.

Kontroller och åtgärder för säng

Kontrollera först följande:

1. Om sladden är i.
2. Kontrollera att inga sladdar är i kläm.
3. Kontrollera om det har gått en säkring i bostaden.
4. Om eluttaget fungerar dit sängen är ansluten, prova annars annat eluttag.

Det kan bli aktuellt att vårdtagaren behöver stanna i sin säng eller sova på annan plats i väntan på åtgärd, till exempel madrass på golvet.

Nödsänkning av sängbotten i vårsäng (denna beskrivning gäller Invacare SB755). Läs bruksanvisning för att säkerställa tillvägagångssätt för nödsänkning.

1. Ta ut stickkontakt ur vägguttaget.
2. Rygg- lår eller bendel kan nödsänkas genom att låssprintern tas bort, se bruksanvisning.
3. Minst två personer behövs för att utföra nödsänkning. Båda måste hålla fast i berörd sängbottendel. Den ena personen lokaliserar berörd motor och drar ut låssprintern. Båda sänker långsamt sängbottendelen tills den är helt sänkt.
4. Bör inte utföras när patienten är i sängen.
5. Nödsänkning kan ej utföras för sängens höjdställning.

Kontroller och åtgärder för transportrullstol

Om behov uppstår finns transportrullstol att låna på kommunens servicehus samt vård och omsorgsboende.